

# **cobas p 671**

centrifuge unit (67x)

附录

发行版本 2.0

软件版本 2.0.0



## 目录

---

|                |   |
|----------------|---|
| 出版信息 .....     | 4 |
| 清洁液和设备列表 ..... | 5 |

# 出版信息

| 发行版本 | 修订日期       | 变更说明 |
|------|------------|------|
| 1.0  | 2021 年 7 月 | 第一版  |

出版信息

修订更新后的清洁液和设备列表。

## 受影响的系统

| 系统                                | 用户手册出版信息 | 适用的软件版本 | 变更说明       |
|-----------------------------------|----------|---------|------------|
| cobas p 671 centrifuge unit (67x) | 2.0      | 2.0.0   | 更新后的清洁材料列表 |

更新后的信息本部分包含更新后的清洁液和设备列表。

# 清洁液和设备列表

请使用与系统表面相容的清洁液、消毒剂和设备。在对系统进行清洁或消毒时，我们建议使用下列物质。

## 常用清洁液和消毒剂

### 注意！

#### 研磨性清洁材料

使用研磨性清洁材料可能会损坏系统。

▶ 切勿使用含研磨性材料的清洁剂。

- 酒精（例如异丙醇或 70% 乙醇）
- 1% 次氯酸钠溶液
- 实验室消毒剂（例如 Meliseptol®）
- 去离子水（仅用于清洁）
- 自来水（仅用于清洁）



如果当地法规禁止使用某一推荐的清洁液，请使用符合您当地法规的等效清洁液。

#### 其他设备：

- 强效消毒湿巾（来自 PDI）
- 硅油
- 干净的无绒吸水布
- 实验室手套
- 清洁刷
- 条码标签打印机清洁工具套件
- 摄像头镜头清洁工具套件
- 六角扳手（2.5 mm、8 mm）
- 棉签或湿布，用于清洁光学部件，例如样本管鉴别装置、传感器

本页有意留为空白。



**Published by:**

Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH  
71636 Ludwigsburg  
Germany

[www. Roche .com](http://www. Roche .com)