

Instrucciones para la suspensión de muestras obtenidas con

Rovers Evalyn® Brush




Instrucciones para la manipulación de muestras de autotoma obtenidas mediante Rovers Evalyn® Brush para el análisis con las pruebas **cobas® 4800 HPV** o **cobas® HPV**.


La muestra de autotoma debe introducirse en un medio después de su obtención.

- **Lea todas las instrucciones antes de iniciar la suspensión de la muestra.**
- Siga las instrucciones de uso del fabricante del dispositivo de obtención para obtener la muestra.
- Una vez obtenida, proceda con las siguientes instrucciones para conservar la muestra:


Manipule con cuidado la muestra obtenida.

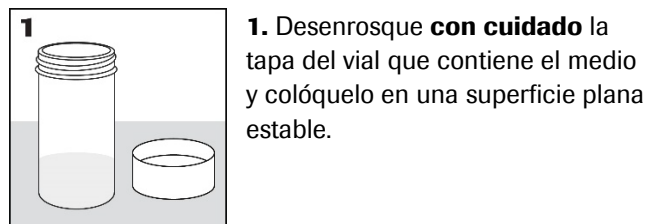


1. Desenrosque **con cuidado** la tapa del vial que contiene el medio y colóquelo en una superficie plana estable.

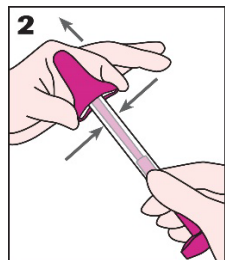


2. Retire el tapón de color rosa del cepillo Evalyn Brush **procurando no tocar el extremo que queda expuesto**.

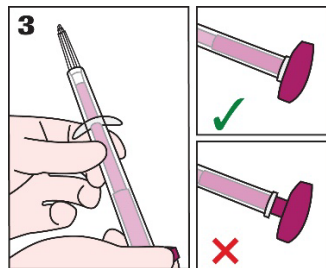

3. Presione el émbolo rosa hasta que encaje y aparezca el cepillo blanco. **Evite que el cepillo toque cualquier cosa** (p. ej., dedos, superficies).

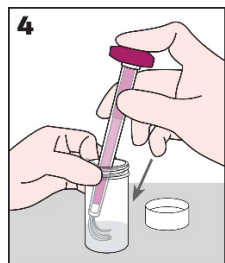


4. Sujete el vial con una mano mientras con la otra coloca el cepillo blanco en el vial de forma que **las cerdas queden completamente sumergidas en el medio y las alas queden por encima de la abertura del vial**.

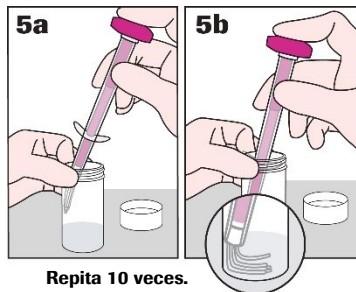

5. Mientras sujeta el vial, sumerja el cepillo con fuerza, **apretando el cepillo blanco contra el fondo y la pared interior del vial 10 veces para maximizar la liberación de la muestra**. Extreme el cuidado para no salpicar.




6. Retire el cepillo blanco arrastrándolo por la pared interior del vial primario hasta que ya no esté sumergido en el medio. **Presione el cepillo contra la pared interna del vial para drenar el fluido** del cepillo. Vuelva a colocar el cepillo Evalyn Brush en el interior del embalaje y deséchelo.

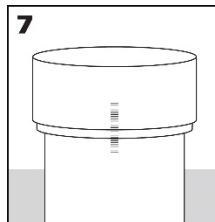


7. Vuelva a tapar el vial hasta que **las líneas del tapón y el vial coincidan o se solapen ligeramente** para evitar fugas. Consérvelo en posición vertical.

8. La muestra ya puede analizarse con las pruebas **cobas® 4800 HPV** o **cobas® HPV**.

Glosario

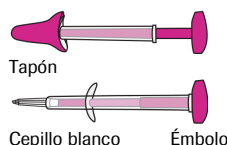

Evalyn Brush: dispositivo para autotoma utilizado para obtener una muestra.

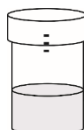

Vial: recipiente con 20 ml de solución clara. La muestra obtenida debe transferirse a este recipiente, que será el que debe enviarse al laboratorio para el análisis.

Medio: nombre con el que se denomina el líquido contenido en el vial.

Marcas registradas y patentes

Consulte <http://www.roche-diagnostics.us/patents>

Copyright

Consulte <https://diagnostics.roche.com/us/en/about-us/patents>

Asistencia

Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con el personal sanitario.

Fabricante e importador



Roche Molecular Systems, Inc.
1080 US Highway 202 South
Branchburg, NJ 08876 USA
www.roche.com



Fabricado en los EE. UU.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
Germany

Revisión del documento

Información de revisión del documento	
Doc Rev. 1.0 11/2022	Primera publicación.