



Accu-Chek® Inform II

SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

Supplement voor de Handleiding v7

*Aanvullende wijzigingen van de
Handleiding versie 7*

Overzicht van herzieningen

Versie van de Handleiding	Herzieningsdatum	Wijzigingen
Versie 1.0	2021-02	Nieuw document, als aanvullende wijziging van de Handleiding versie 7.0 voor SW 04.04; paragraaf "Automatisch wissen" bijgewerkt; informatie over herstart voor onderhoud toegevoegd.
Versie 2.0	2021-09	Informatie over geopende flacons met teststrips toegevoegd.

Doel van het document

Dit document bevat een beschrijving van wijzigingen in de Handleiding V7 voor SW 04.04.00.

Dit supplement is geldig voor en bedoeld voor gebruik tezamen met de Accu-Chek Inform II Handleiding versie 7.0. Het is geen vervanging van de volledige Accu-Chek Inform II Handleiding versie 7.0.



Lees de volledige Accu-Chek Inform II Handleiding versie 7.0 goed door.

© 2018-2021, Roche Diagnostics. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van dit document, inclusief alle afbeeldingen, is het eigendom van Roche Diagnostics. Geen enkel onderdeel van dit document mag, voor welk doel dan ook, op enigerlei wijze of in enigerlei vorm worden vervoelvoudigd of verzonden (elektronisch of mechanisch) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Roche Diagnostics. Roche Diagnostics heeft alle in redelijkheid te verwachten moeite gedaan om er voor te zorgen, dat de in deze gebruiksaanwijzing weergegeven informatie op het tijdstip van drukken correct is. Roche Diagnostics behoudt zich echter het recht voor om hierin zonder voorafgaande kennisgeving de uit voortgaande productontwikkeling voortvloeiende noodzakelijke wijzigingen aan te brengen.

Voor vragen en opmerkingen over dit document kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiging van Roche Diagnostics.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA en COBAS zijn merken van Roche.

Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.



Het Wi-Fi CERTIFIED-logo is een certificatiemerk van de Wi-Fi Alliance.

Doel van het document	2
1 Aanvullende wijzigingen van de Handleiding versie 7.0	5
Herziene paragrafen	5
4.1 Informatie over metingen van glucosecontrolematerialen.....	5
Intervallen tussen metingen van glucosecontrolematerialen.....	5
9.3 De meter op het dockingstation plaatsen	6
Scherm Op dockingstation - meterstatus.....	6
10.6 Servicemenu	7
Automatisch wissen	7

Deze pagina is met opzet blanco gelaten.

1 Aanvullende wijzigingen van de Handleiding versie 7.0

Herziene paragrafen

4.1 Informatie over metingen van glucosecontrolematerialen

Intervallen tussen metingen van glucosecontrolematerialen



De volgende informatie wordt **gewijzigd of toegevoegd** op pagina 72:

De intervallen tussen de metingen van glucosecontrolematerialen worden door uw instelling of laboratorium vastgesteld. Deze intervallen worden ingevoerd tijdens de configuratie van het systeem. Als een ingesteld interval is verstreken (of bij een bepaalde gebeurtenis, zoals het starten van een meting met een nieuwe charge(lot) teststrips), wordt er, zowel na het aanzetten van de meter als na het selecteren van de functie *Glucosetest*, een waarschuwing op de display weergegeven.

In de volgende gevallen wordt aangeraden de glucosecontrolematerialen te meten:

- ...
- **Als een flacon met teststrips open heeft gestaan.**
- ...

Daarnaast kunnen de volgende gebeurtenissen tijdens het instellen worden ingevoerd als reden om een meting van een glucosecontrole uit te voeren:

- Als een voorgaande controlemeting buiten het toegestane controlewaardenbereik ligt.
- Als de metingen van de glucosecontrolematerialen niet op het juiste tijdstip (juiste interval) zijn uitgevoerd.



WAARSCHUWING

Als de flacon voor het eerste gebruik van de teststrips open of beschadigd is, als de flacon niet goed met de dop is afgesloten, als u beschadiging van de dop of de flacon vaststelt of als de dop de flacon om enige reden niet goed afsluit, moet u de teststrips niet gebruiken. Voer geen functiecontrolemeting uit. Neem contact op met Roche.

9.3 De meter op het dockingstation plaatsen

Scherf Op dockingstation - meterstatus

De volgende informatie wordt **toegevoegd** op pagina 130:

Als de meter op het dockingstation is geplaatst, geeft deze, afhankelijk van de actuele status van de meter, verschillende meldingen weer.

De volgende displayweergaven worden op de meter weergegeven, als de meter op een Accu-Chek Inform II-dockingstation of een Accu-Chek Inform II-dockingstation Light is **geplaatst** en er **communicatie plaatsvindt**. Dezelfde displayweergaven worden weergegeven, als de meter gegevens hetzij via een dockingstation of via een draadloze aansluiting overdraagt.



Deze displayweergave wordt weergegeven, als de communicatie nog steeds actief is, maar de meter bezig is met het verwerken van de ontvangen gegevens of in afwachting is van de volgende melding met gegevens van het DMS.

Terwijl de meter op het dockingstation geplaatst is en wordt opgeladen, wordt regelmatig de verstrekten tijd sinds de laatste herstart voor onderhoud gecontroleerd. Na minimaal 24 uur wordt weer een herstart voor onderhoud geïnitieerd. Gedurende deze herstart voor onderhoud worden de integriteit van de opgeslagen gegevens en de werking van de meetmodule gecontroleerd. Daarnaast wordt gezocht naar verouderde resultaten op het systeem die kunnen worden gewist, omdat de geconfigureerde bewaarperiode voor deze gegevens verstrekten is.

10.6 Servicemenu

Automatisch wissen

De volgende informatie wordt **gewijzigd** op pagina 171:

Als een bewaarperiode via het DMS geconfigureerd is, worden verouderde resultaten automatisch gewist¹ als deze aan de volgende criteria voldoen:

- Het resultaat is ouder dan de geconfigureerde bewaarperiode
- Het algoritme voor het wissen van resultaten is op automatisch ingesteld
- Als de configuratie "Downloaden van het resultaat verplicht" ingeschakeld is, moet het resultaat al naar het DMS verzonden zijn

Deze resultaten worden automatisch gewist voorafgaand aan elke test en/of wanneer de meter via een herstart voor onderhoud wordt ingeschakeld. Zie pagina 130 (pagina 5 in dit supplement) voor meer informatie over de herstart voor onderhoud.

Het automatisch wissen van patiëntgegevens volstaat niet als een meter naar de fabrikant moet worden teruggestuurd of aan een andere instelling of ander laboratorium wordt overgedragen. Indien dit het geval is, wist u **alle** in de meter opgeslagen gegevens handmatig.

1. Na middernacht van de volgende dag.

Deze pagina is met opzet blanco gelaten.

Aantekeningen

Aantekeningen

Deze pagina is met opzet blanco gelaten.



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM,
ACCU-CHEK PERFORMA en COBAS
zijn merken van Roche.



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.roche.com
www.cobas.com

0 9429298054 (02) 2021-09 NL

ACCU-CHEK®