

Instrucciones para la suspensión de muestras obtenidas con

Rovers Evalyn® Brush




Las siguientes instrucciones de suspensión de muestras de autotoma obtenidas mediante Rovers Evalyn® Brush corresponden a las instrucciones de uso de **cobas® HPV Test** (P/N 05641268001) y a las instrucciones de uso de **cobas® HPV** (P/N 09199578001).


La muestra de autotoma debe introducirse en un medio después de su obtención.

- **Lea todas las instrucciones antes de iniciar la suspensión de la muestra.**
- Siga las instrucciones de uso del fabricante del dispositivo de obtención para obtener la muestra.
- Una vez obtenida, proceda con las siguientes instrucciones para conservar la muestra:


Manipule con cuidado la muestra obtenida.

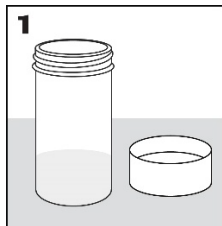


1. Desenrosque **con cuidado** la tapa del vial que contiene el medio y colóquelo en una superficie plana estable.

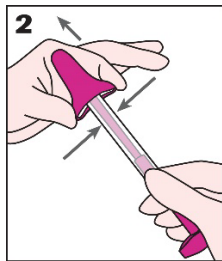


2. Retire el tapón de color rosa del cepillo Evalyn Brush **procurando no tocar el extremo que queda expuesto.**

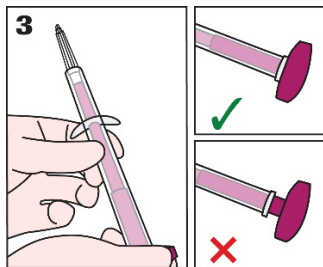

3. Presione el émbolo rosa hasta que encaje y aparezca el cepillo blanco. **Evite que el cepillo toque cualquier cosa** (p. ej., dedos, superficies).

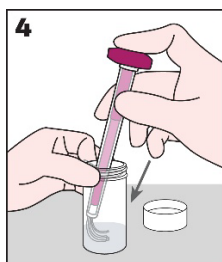

4. Sujete el vial con una mano mientras con la otra coloca el cepillo blanco en el vial de forma que **las cerdas queden completamente sumergidas en el medio y las alas queden por encima de la abertura del vial.**

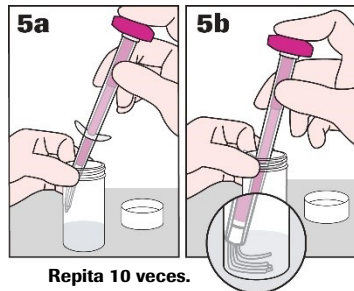


Repita 10 veces.

5. Mientras sujeta el vial, sumerja el cepillo con fuerza, **apretando el cepillo blanco contra el fondo y la pared interior del vial 10 veces para maximizar la liberación de la muestra.** Extremar el cuidado para no salpicar.




6. Retire el cepillo blanco arrastrándolo por la pared interior del vial hasta que ya no esté sumergido en el medio. **Presione el cepillo contra la pared interna del vial para drenar el fluido del cepillo.** Vuelva a colocar el cepillo Evalyn Brush en el interior del embalaje y deséchelo.

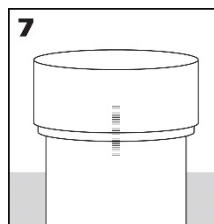


7. Vuelva a tapar el vial hasta que **las líneas del tapón y el vial coincidan o se solapen ligeramente** para evitar fugas. Consérvelo en posición vertical.

8. La muestra ya puede analizarse con las pruebas **cobas® HPV**.

Glosario

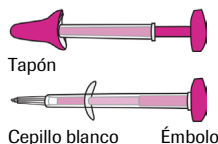

Evalyn Brush: dispositivo para autotoma utilizado para obtener una muestra.

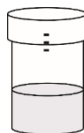

Vial: recipiente con 20 ml de solución clara. La muestra obtenida debe transferirse a este recipiente, que será el que debe enviarse al laboratorio para el análisis.

Medio: nombre con el que se denomina el líquido contenido en el vial.

Marcas registradas y patentes

Consulte <https://diagnostics.roche.com/us/en/about-us/patents>

Derechos de autor

©2024 Roche Molecular Systems, Inc.

Fabricante y distribuidor



Roche Molecular Systems, Inc.
1080 US Highway 202 South
Branchburg, NJ 08876, USA
www.roche.com

Fabricado en los EE. UU.

Distributed by Roche Diagnostics
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46250-0457, USA
(For Technical Assistance call the
Roche Response Center
toll-free: 1-800-526-1247)

Revisión del documento

Información de revisión del documento	
Doc Rev. 1.0 09/2024	Primera publicación.